

Profident / Profident PLUS

174000, 174001

Why does the nozzle quickly become blocked?

Please ensure, that you always and exclusively use distilled water when operating the device. The very fine nozzle calcify rapidly.

Wieso ist die Düse innerhalb kurzer Zeit verstopft?

Stellen Sie sicher, dass Sie jederzeit nur und ausschließlich destilliertes Wasser zum Betrieb verwenden. Die sehr feinen Düsen verkalken sehr schnell.

Can the tips for the old blue scaler and new white scaler be interchanged?

No, unfortunately not. The tips of the scaler with the blue handle have outer thread. You can order them under Item No. 1740230401, 1740230402 and 1740230403. The tips of the scaler with the grey/white handle have inner thread. You can order them under Item No. 176871, 176872 and 176873.

Können die Aufsätze des alten blauen und des neuen grauweißen ausgetauscht werden?

Leider nicht. Die Spitzen des Scalers mit dem blauen Griff haben ein äußeres Gewinde (zu bestellen unter Art.Nr. 1740230401, 1740230402, 1740230403). Die Spitzen des Scalers mit dem grauweißen Griff haben ein inneres Gewinde (zu bestellen unter Art. Nr. 176871, 176872, 176873).



Scaler mit blauem Griff (alt)
blue handle (old)



Scaler mit grauweißen Griff (neu)
grey/white handle (new)

EICKEMEYER®

GERMANY | Eltstraße 8 | 78532 Tuttlingen | Deutschland | T +49 7461 96 580 0 | F +49 7461 96 580 90 | info@eickemeyer.de | www.eickemeyer.de
SWITZERLAND | Sandgrube 29 | 9050 Appenzell | Schweiz | T 071 788 23 13 | F 071 788 23 14 | info@eickemeyer.ch | www.eickemeyer.ch
UNITED KINGDOM | 3 Windmill Business Village | Brooklands Close | Sunbury-on-Thames | Surrey | TW16 7DY | UK | T 020 8891 2007 | www.eickemeyer.co.uk
DENMARK | Solbakken 26 | Hammelev | 6500 Vojens | Danmark | T +45 70 20 50 19 | info@eickemeyer.dk | www.eickemeyer.dk
NETHERLANDS | Doejenburg 203 | 4021 HR Maurik | Nederland | T +31 345 58 9400 | info@eickemeyer.nl | www.eickemeyer.nl
ITALY | Via G. Verdi 8 | 65015 Montesilvano (PE) | Italia | T 085 935 4078 | F 085 935 9471 | info@eickemeyer.it | www.eickemeyer.it
POLAND | Al. Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa | Polska | T 22 185 55 76 | F 22 185 59 40 | info@eickemeyer.pl | www.eickemeyer.pl
CANADA | 617 Douro Street, Suite 205 | Stratford | Ont. | Canada | N5A 0B5 | T +1 519 273 5558 | info@eickemeyervet.ca | www.eickemeyercanada.ca

Profident / Profident PLUS

174000, 174001


How do I know if my dental scaler tips are still usable?

Place the tips on the template enclosed with your original product or on the images below. Use the coloured examples as your guide to check if the tips are usable. This template is applicable to scaler tips which are included with products 174001 and 176880.

Woher weiß man, ob Scaler-Spitzen noch verwendbar sind?

Verwenden Sie einfach die mitgelieferte Vorlage oder legen die Spitze auf die Abbildung unten. Folgen Sie den farbigen Hinweisen bzgl. der Beurteilung der Scaler-Spitzen.

Vorlage verwendbar für die zu den Artikeln 174001 und 176880 gehörenden Scaler-Spitzen.

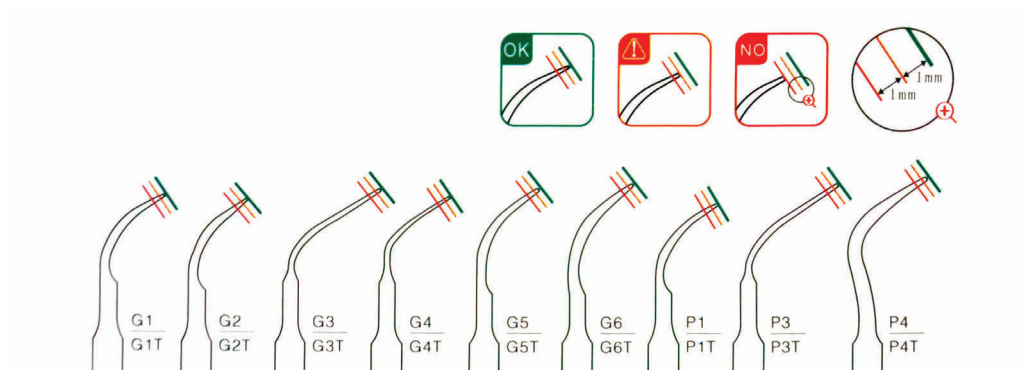

EICKEMEYER®

GERMANY | Eltstraße 8 | 78532 Tuttlingen | Deutschland | T +49 7461 96 580 0 | F +49 7461 96 580 90 | info@eickemeyer.de | www.eickemeyer.de

SWITZERLAND | Sandgrube 29 | 9050 Appenzell | Schweiz | T 071 788 23 13 | F 071 788 23 14 | info@eickemeyer.ch | www.eickemeyer.ch

UNITED KINGDOM | 3 Windmill Business Village | Brooklands Close | Sunbury-on-Thames | Surrey | TW16 7DY | UK | T 020 8891 2007 | www.eickemeyer.co.uk

DENMARK | Solbakken 26 | Hammelev | 6500 Vojens | Danmark | T +45 70 20 50 19 | info@eickemeyer.dk | www.eickemeyer.dk

NETHERLANDS | Doejenburg 203 | 4021 HR Maurik | Nederland | T +31 345 58 9400 | info@eickemeyer.nl | www.eickemeyer.nl

ITALY | Via G. Verdi 8 | 65015 Montesilvano (PE) | Italia | T 085 935 4078 | F 085 935 9471 | info@eickemeyer.it | www.eickemeyer.it

POLAND | Al. Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa | Polska | T 22 185 55 76 | F 22 185 59 40 | info@eickemeyer.pl | www.eickemeyer.pl

CANADA | 617 Douro Street, Suite 205 | Stratford | Ont. | Canada | N5A 0B5 | T +1 519 273 5558 | info@eickemeyervet.ca | www.eickemeyercanada.ca